



guardiamo ai risultati

**Life
med**  sistemi integrati
per l'estetica



UP LIFE

UP LIFE

amplifica la
sensibilità e la
forza delle tue mani

le tue mani + up life = + risultati - fatica



UP LIFE

UP LIFE

TECNOLOGIE

BIO-ELETTROSTIMOLAZIONE

La bio-elettrostimolazione utilizza ai fini del trattamento le varie azioni fisiche e biologiche dell'elettricità e consiste nel far passare attraverso parti del corpo umano correnti elettriche che possono essere di diversi tipi con caratteristiche opportunamente scelte in base agli scopi da raggiungere ed alle azioni fisiologiche che tali correnti generano.

Per "corrente elettrica" si intende uno spostamento di cariche elettriche in un corpo, per ottenere questo spostamento è necessaria una causa che lo produca: una causa cioè che "forzi" gli elettroni a muoversi. Questa causa viene definita con il termine: differenza di potenziale o tensione.

I principali effetti ottenibili con l'elettrostimolazione applicata ad un tessuto sono:

EFFETTO ECCITOMOTORIO, TERMICO, ANALGESICO, TROFICO e CHIMICO.

La **BIO-ELETTROSTIMOLAZIONE** di UP LIFE tende ad ottenere gli stessi effetti dell' elettroSTIMOLAZIONE limitando lo "STRESS" cellulare.

L'utilizzo di spike di corrente bifasica permette infatti di innescare gli effetti benefici inattesi contenendo, però, la "polarizzazione del dipolo cellulare"

UP LIFE si avvale di due tipi di elettrodi:

- **elettrodi a guanto per il corpo.**

Treatment con una doppia efficacia: abbinare gli effetti della stimolazione elettrica (ottenuta attraverso un guanto di tessuto elettricamente conduttivo) e le tecniche di un massaggio "classico". Tali effetti possono essere selezionati e controllati per

"personalizzare" ed avere il massimo rendimento per l'inetestismo che si vuole trattare; il massaggio si avvale delle conoscenze dell'operatore con il vantaggio di ottenere il risultato con nessuna fatica e sforzo fisico.

- **applicatore con micro elettrodi puntiformi**

utilizzato per:

- (bio-elettrostimolazione) trattamento per il rassodamento tessutale
- favorire un più rapido assorbimento dei prodotti cosmetici



Manipolo bipolare per trattamento viso e décolleté (optional)



Manipolo bipolare specifico per trattamento rughe (optional)

**MED
ELETTRONICA**

Via Maestri del Lavoro 8A
05100 TERNI ITALY
0744/800326

amministrazione@medelettronica.it